

# Fiche technique





#### Informations


Désignation Barre droite Arsis 500 mm, Alu Epoxy Blanc & Chromé mat

Référence 049950

### Les + produit

- + Préhension améliorée grâce à son tube elliptique.
- + Esthétique et design.
- + Garantie totale anticorrosion.

# Description

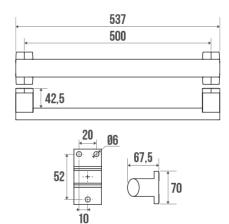

Tube elliptique  $38 \times 25 \text{ mm}$  en aluminium époxy blanc. Cache-fixations en résine de synthèse chromé mat.

Visserie fournie.

Le design de ce produit est coordonné aux produits Confort Arsis.

Parfaitement adapté pour l'hôtellerie.

# Caractéristiques techniques

Matière

Finition Couleur

Dimensions

Diamètre Ø

Poids brut

Poids net

Conditionnement

CE - charge admissible

Tests laboratoire à

Aluminium

Epoxy

Blanc & Chromé mat

500 mm

38 x 25 mm

0.580 kg

0.485 kg

Sachet plastique + Cavalier pour mise en place sur broche

150 kg

225 kg

Page 1/2



Garantie

Gencod

Notice

Code douanier

Pièces détachées

10 ans

3563390499504

7615200000

A04984002\_IND\_05

Réf. 049007 : Support de fixation alu chromé, Réf. 049009 : Cache-fixation gris chromé mat

## Conseils de pose et entretien

Hauteur de pose conseillée: 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

#### Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. ATTENTION, NE PAS UTILISER des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

### Confort d\'usage

Fonction		Caractéristiques		_
Maintien	***	Horizontal	***	
Relevage	★★☆	Vertical	***	
Transfert	***	Oblique	★☆☆	
		Anticorrosion	***	
Type d'utilisation		Lieux d'utilisation		_
Bain	***	Ets médicaux	***	
Douche	***	ERP/IOP	***	
WC	***	Hôtels	***	
Vestiaire/Cabine	***	Habitats privatifs	***	
		Lieux de travail	***	

Fiche produit mise à jour le : 11/01/2019